


ハンド リラックス ラボ


品番 C-EM002WS

取扱説明書 / 保証書

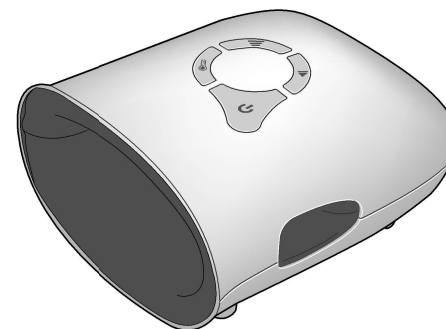

もくじ	ページ
安全のために必ずお守りください	2~3
各部の名称	4
使い方	5~7
お手入れ	7
保管について	8
故障かな?と思ったら	8
仕様	9
保証とアフターサービス	10
保証書	11

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
読み終わった後はいつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

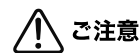






ご注意





- 本体に強い刺激を与えないでください。
- 指輪、アクセサリ、装飾ネイル等の堅いものをつけて使用しないでください。
- 初めて使用する際は”弱”から始めて下さい。
- 1回の使用は10分以内とし、連続して使用する場合は30分以上時間をあけてご使用ください。







安全のために必ずお守りください










本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながる恐れがあります。お使いになる前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。






警告・注意表示について	
 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡や重傷を負う恐れがある内容
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容

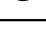


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







安全記号について	
この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、以下の記号を併記して注意を促しています。	
	絶対に行わないでください
	絶対に分解・修理・改造はしないでください
	強制・指示

 警告	
	<p>次のような人は必ず医師とご相談の上で使用ください。事故や健康を害する恐れがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害からくる知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要としている人や体調がすぐれない人 ●骨粗鬆症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど、急性疾患の人 ●手にしびれのある人 ●高血圧の人 ●低温やけどをしたことのある人 ●血行障害、血管障害など、循環器に障害のある人 ●変形性関節炎、リウマチ、痛風の人 ●体温38℃以上(有熱期)の人 例：急性炎症症状の強い時期、衰弱しているとき ●その他、医療機関で治療中の人 ●腱鞘炎の人 ●医師からストレッチを禁じられている人 ●上記以外に、とくに身体に異常を感じている人
	幼児や小さいお子様に使用させたり、本製品で遊ばせたりしないでください。思わぬ事故の原因になります。
	分解・改造はしないでください。火災・感電・けがの原因になります。


 警告	
	使用前に内カバーに破れがないか確認し、破れがある場合は使用を中止してください。内カバーを外した状態、破れた状態で使用しないでください。内カバーが破れた場合は修理などせず、お買い上げの販売店または製造販売元に連絡してください。事故やけがの原因になります。
	コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。感電・ショート・火災の原因になります。
	自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。けがの原因になります。
	手以外には使用しないでください。事故やけがの原因になります。
	<p>低温やけどをおこす恐れがあります。次のような使いかたはしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●熱すぎると感じた場合の使用 ●こたつの中や、ストーブなどの暖房器具の近くでの使用
<p>「低温やけど」について</p> <p>比較的低い温度(40℃～60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛い等の自覚症状がなくても低温やけどの恐れがあります。</p>	

 警告	
	同時に複数の人が使用しないでください。故障や事故の原因になります。
	長い爪での使用や指輪、アクセサリ、装飾ネイル等の堅いものをつけて使用しないでください。事故やけがの恐れがあります。
	異常を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。事故やけがの原因になります。
	停電のときはすぐに電源を切ってください。感電・ショート・火災の原因になります。
	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります。
	ACアダプタのコードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因になります。
	ACアダプタは指定された付属のものをご使用ください。また、付属のアダプタはほかの製品には使用しないでください。他のアダプタを使用すると故障の原因になります。
	手が濡れた状態で使用しないでください。感電の原因になります。

 注意	
	浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。感電や故障の原因になります。
	本体の上に物を置いたり、荷重をかけたりしないでください。故障や事故の原因になります。
	本体に強い衝撃をあたえないでください。故障や事故の原因になります。
	使用中は眠らないでください。無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

 注意	
	布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。本体内部が高温になる可能性があります。
	平らな場所に置いて使用してください。故障や事故の原因になります。
	電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずACアダプタを持って引き抜いてください。感電・ショート・発火の原因になります。
	使用しない場合はACアダプタをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
	エアバッグに故意に力を加えて無理に止めないでください。けがや故障の原因になります。
	本製品は片手用です。両手を入れて使用しないでください。事故やけがの原因になります。
	緊急時や動作中に異常を感じたら、直ちに使用を停止して、ACアダプタプラグを本体から抜いてください。事故やけがの原因になります。
	使用前後は点検を行い、故障又は異常が認められた場合は、勝手に修理などせず、お買い上げの販売店、又は製造販売元までご連絡ください。事故やけがの原因になります。
	初めてご使用の際は強さを「弱」で使用し、使用中身体に異常がないか十分注意してください。初めから刺激を強くすると、健康を害する恐れがあります。
	1回の使用時間は10分以内としてください。1日に複数回使用される場合は30分以上、時間をあけて3回までにしてください。長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。
	「弱」でも強すぎると感じた時は、1回の使用時間を短くしてください。強い刺激のまま使用を続けると、健康を害する恐れがあります。


各部の名称

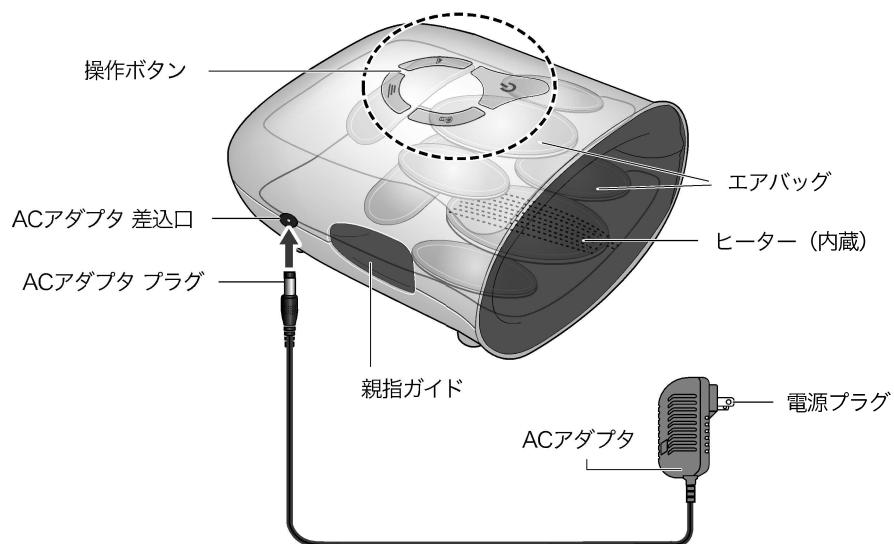

使い方

1 ACアダプタと本体をつなぐ


まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

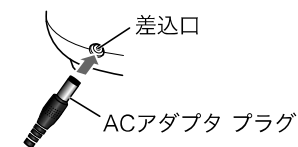

2 ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む

正しく確実に差し込んでください。

※充電が開始され電源ボタンが赤色に点滅します。
充電が完了すると赤色に点灯します。
※電池残量が無い状態からフル充電まで約 2.5 時間かかります。

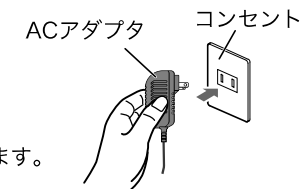


3 コードレスで使用する / コードをつないで使用する

コードレスで使用する

初めて使用するとき、又は長時間使用しなかったときは、電池が放電し作動しないことがあります。充電してからお使いください。

※電源ボタンが赤色の点滅から点灯になると充電が完了です。

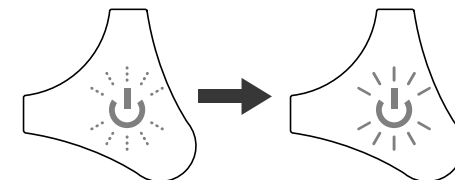

AC アダプタをコンセントから外し、本体から AC アダプタプラグを外してください。


●約 2.5 時間のフル充電で、約 1.5 時間使用できます。
※使用する環境、負荷によって使用時間は異なります。

コードをつないで使用する

コンセントに差し込んだ AC アダプタを本体につないだままご使用ください。
●コンセントからの電源で動作します。この場合、動作中は充電されません。

⚠️ ご注意 使用前の注意事項

- 使用前に本体内部の内カバーに破れがないか確認してください。
- 使用前に操作ボタンやタイマーが正常に動作するか確認してください。
- しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本製品が正常にまた、安全に動作することを確認してからご使用ください。

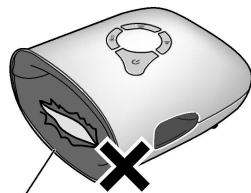

本体内部
内カバーに破れがないか
確認してください。


⚠️ ご注意

使い始めは弱からご使用ください。
使用中身体に異常がないか十分注意してください。


使い方

4 本体に手を差し込む

使用したい側の手をひらき、内部の仕切り窓(指ガイド)に従って4本の指をしっかりと差し込みます。親指は左右の窓(親指ガイド)から出します。

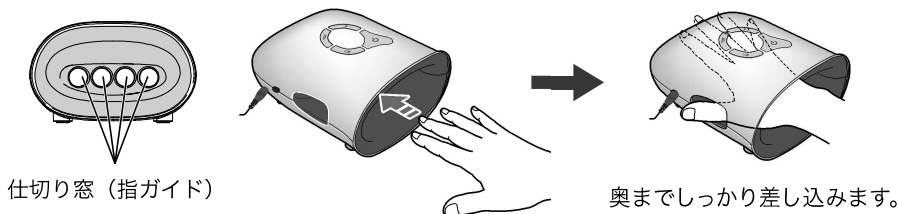

使用例

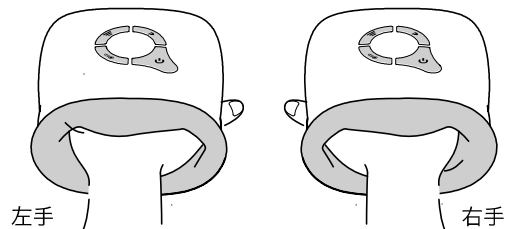

⚠️ ご注意

本体への手の抜き差しは必ず電源がOFFの時に行ってください。

⚠️ ご注意

- 長い爪での使用や指輪、アクセサリ、装飾ネイルなど硬いものをつけて使用しないでください。
- 平らな場所において使用して下さい。
- 濡れた手で使用しないでください。

各ボタンの機能


電源ボタン		電源 ON 緑色が点灯 電源 OFF 消灯 充電中 赤色が点滅 充電完了 赤色が点灯 電池残量少 緑色が点滅
開始停止ボタン		動作時 白色点灯 停止時 消灯
強度ボタン		弱 バー 1 本が白色に点灯 中 バー 2 本が白色に点灯 強 バーすべてが白色に点灯 <small>※スタート時は弱です。 ※強度のランプが見えづらい時は本体の真上から見るようにしてください。</small>
ヒーターボタン		動作時 白色点灯 停止時 消灯

5 電源ボタンで電源 ON/OFF、開始停止ボタンで動作 START/STOP

動作を開始する

電源ボタン を押しと電源 ON となります。ON 状態で開始停止ボタン を押しと動作が開始されます。もう一度開始停止ボタンを押しと停止し、もう一度電源ボタンを押しと OFF になります。

電源ボタンを押してから、約 10 分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に電源が OFF となります。

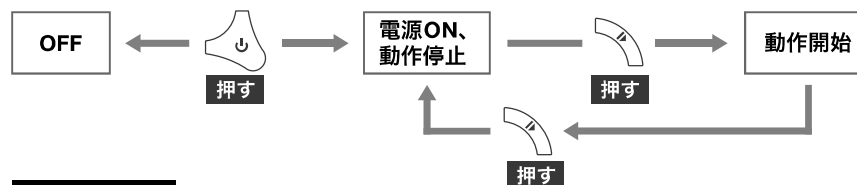

強度を選ぶ

動作中、強度ボタン でエアバッグの強さを変更することができます。スタート時は弱で動作します。強度ボタン を押すたびに「弱」→「中」→「強」が切り替わります。

ヒーターを開始する

ヒーターボタン を押すたびに「ヒーター ON」→「ヒーター OFF」が切り替わります。
※ヒーターは単独で使用可能です。

お手入れ

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 年に一度は電源プラグ(金属部分)をから拭きをしてください。(絶縁劣化防止のため)

⚠️ ご注意

- 必ず電源が「OFF」の状態 ACアダプタをコンセントから抜いて行ってください。
- 長期間使わずに保管していると、電池性能が低下することがあります。電池性能の低下を防ぐためにも3ヵ月に1回は充電が空になるまで使用し、満タンまで充電を行ってください。

保管について

- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- コード類はねじれをほどいて保管してください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。分解したり、修理改造は絶対にしないでください。異常動作をしてけがや事故の恐れがあります。

動かない	充電が切れていませんか？長時間放置すると放電し充電がなくなっていることがあります。
	分解したり、修理改造は絶対にしないでください。
運転中に停止した	電源ボタンを押してから、約10分経過するとタイマー機能ははたらき、自動的に電源がOFFになります。故障ではありません。電源ボタンを押すと運転を再開します。
異音がる音が大きい	エアポンプの動作音は構造上発生するものですので、異常ではありません。

仕様

品名	ハンド リラックス ラボ
品番	C-EM002WS
電気定格	AC 100V 50/60Hz 10W (ヒーター 4W)
アダプタ定格	入力 100V 50/60Hz 0.5A 出力 5V 2A
使用充電電池	リチウムイオン電池
充電時間・持続時間	充電所要時間：約 2.5 時間、電池持続時間：約 1.5 時間
タイマー	10 分
製品サイズ	約 W 18 × D 20 × H 11 cm
製品重量	約 850g
素材	本体：ABS 内カバー：ポリウレタン+ポリエステル
ヒーター温度	約 45 度以下
生産国	中国
製造販売元	株式会社クレオテクノロジー

保証とアフターサービス 必ずお読みください。

(1) 保証書

保証書は措定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管ください。

(2) 保証期間中に修理を依頼される場合

保証書の記載内容に従って修理いたします。

(3) 保証期間をすぎて修理を依頼される場合

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

(4) 補修用部品の最低保有期間

当社はこの「ハンドリラックスラボ」の補修用性能部品*を製造打ち切り後最低2年間保有しております。

*補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する為に必要な部品です。

(5) ご使用中に異常を感じましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に

点検・修理をご依頼ください。

※お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対におやめください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、まずはお買い上げ販売店にお申し付けください。

ハンドリラックスラボ お客様相談窓口

フリーダイヤル



0120-540-743

受付時間 土日、祝日を除く平日 10:00~17:00

株式会社クレオテクノロジー