


ミミミン 品番 C-RW001PP

取扱説明書



もくじ

安全のために 必ずお守りください	2～8	保管及び廃棄	14
セット内容及び各部の名称	9	故障かなと思ったら	15～16
お使いになる前に	10～11	仕様	17
使い方	12～13	保証とアフターサービス	18
お手入れ方法	14	保証書	19

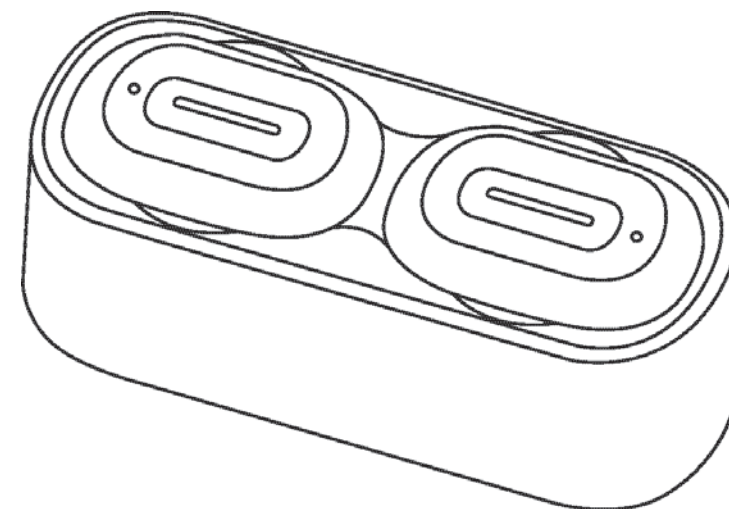

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
また、読み終わった後はいつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

- 安全のため、警告及び注意表示を必ず守ってください。
- 連続使用時間は20分以内とし、20分を超える過度な使用はやめてください。
- 乳幼児やペットが本製品に近付かないようご注意ください。

改良のため、デザインや仕様の一部を予告なく変更している場合があります。ご了承ください。



 株式会社クレオテクノロジー

2024年3月発行

安全のために必ずお守りください






本書記載の警告および注意事項を守らずに生じた事故につきましては一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

警告・注意表示について






 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡や重傷を負う恐れがある内容です。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容です。

安全記号について










この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、以下の記号を併記して注意を促しています。

 絶対に行わないでください。	 絶対に分解・修理・改造はしないでください。
 強制・指示	
 絶対に触れないでください。	 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。







警告

-  次のような方は使用しないでください。事故やトラブルの恐れがあります。不明な点は医師に相談の上その指示に従ってください。
- 自分で意思表示できない方
 - 身体に障害のある方
 - 温度や刺激の感覚が自覚できない方
 - 飲酒や薬を服用中の方
 - 耳に疾患のある方
 - 急性疾患のある方
 - 内臓疾患のある方
 - 糖尿病などによる高度な末しょう循環障害による知覚障害のある方
 - 体温38℃以上（有熱期）の方（例：急性炎症症状 [けん怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期、衰弱している場合）
 - 血圧異常のある方
 - 悪性腫瘍のある方
 - 血液疾患のある方
 - 適用部位の皮膚に異常（感染症、創傷など）のある方
 - アレルギー体質、特に肌や皮膚が敏感な方
 - ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害による毛細血管拡張を起こしている方
 - 妊娠中、または妊娠の可能性のある方
 - 出産直後の方
 - 低温やけどをしたことのある方
 - 上記以外に異常を感じている方
-  乳幼児や成長期の子供には使用しないでください。未成年の方は保護者同意の上、保護者監視のもと使用してください。
-  乳幼児や小児、ペットなどの誤飲に注意してください。
-  飲酒、食事直後は使用しないでください。
-  充電端子に金属など導電性のものを絶対に触れさせないでください。短絡（ショート）して、発熱・発火・破裂・発煙の恐れがあります。


 **警告**

-  本製品は国内で使用してください。
-  使用中または充電中に異常発熱する場合は直ちに使用を中止してください。故障や発火の原因となります。
-  本製品は家庭での使用を目的に作られています。業務用での使用など過剰な使用はしないでください。また、用途以外の目的で使用しないでください。
-  イヤリングやピアスなどのイヤークセサリー類は外して使用してください。
-  イヤーピースを取り外した状態で使用しないでください。またイヤープースが破損した状態で使用しないでください。事故やケガの原因となります。
-  熱すぎると感じた時や、痛みや違和感など異常を感じたらすぐに取り外してください。冬場など身体が冷えた状態で使用する際も、熱刺激が過敏に感じる場合があります。
-  運転中は使用しないでください。事故やケガの原因になります。
-  使用中は眠らないでください。無意識での使用は身体への異常やケガの原因になります。
-  充電用 USB ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。


警告

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | パソコンやモバイルバッテリーでの充電は行わないでください。 |
|  | 付属の充電用 USB ケーブル以外は使用しないでください。
また付属の充電用 USB ケーブルを他製品で使用しないでください。故障の原因となります。 |
|  | ご使用になる AC アダプターの仕様を確認してください。(定格出力 DC5V 1.0A) |
|  | ご使用になる AC アダプターに損傷がないか確認し、異常のあるものは絶対に使用しないでください。 |
|  | 本製品を水につけたり水洗いしないでください。 |
|  | 濡れた手で AC アダプターや充電用 USB ケーブルをコンセントから抜き差ししないでください。
感電・ショート・発火の原因となります。 |


 **警告**

 本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しております。火中投下や加熱をしないでください。また、次のような環境での使用、充電、放置、保管は絶対にしないでください。発熱、破裂、発火、故障または事故やトラブルの原因となります。


●火や熱器具の近く ●こたつや布団、毛布の中 ●直射日光の当たる場所 ●炎天下の車内 ●高温になる場所 ●ホコリの多い場所 ●湿気の多い場所 ●傾斜、振動、衝撃のある場所 ●屋外 ●強い電波や磁気の発生する場所 ●乳幼児の手の届く場所

 本製品に異常を感じた場合はただちに使用を中止し、お客様相談窓口（P18 参照）までお問い合わせください。






 乳幼児やペットの手の届く場所に保管しないでください。事故やトラブルの恐れがあります。

 本製品を落としたりぶついたりしないでください。故障、または事故やトラブルの恐れがあります。








連続使用時間（20分）や使用頻度（1日2回まで）は必ず守ってください。

 初めて使用する方や使い慣れていない方は、温度を「弱」に設定し、時間を短めにして様子を見ながら使用してください。

警告


- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 比較的低い温度 (44 ~ 50°C) であっても、長時間皮膚の同じ場所に触れていると、低温やけどをする場合があります。長時間同じ場所に当て続けしないでください。 |
|  | イヤークラスが確実に取り付けられていないと、使用中に外れて耳の中に残る場合があります。使用前には必ず、確実に取り付けられていることを確認してください。 |
|  | 使用中は周囲の音すべてに遮音効果が反映されます。重要な会話や指示、非常時の警告音が聞こえるように、常に周囲の状況にあった適切な使い方をしてください。 |
|  | 使用後のお手入れの際は必ず電源をOFFにしてください。事故やケガの原因となります。 |
|  | 本製品を分解、修理、改造すると重大な事故につながる恐れがありますので絶対に行わず、お客様相談窓口 (P18 参照) までお問い合わせください。 |

注意


- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 浴室など湿気が多い場所では使用しないでください。
また、水などの液体がかからないようにしてください。 |
|  | 落下した場合は使用を中止してください。本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。
落下の衝撃で充電電池にダメージが入り、発火・発煙・破裂など思わぬ事故につながる可能性があります。 |
|  | 使用時に強く押し当てすぎないでください。 |
|  | お手入れの際はベンジン／アセトン／シンナーなどで本製品を拭かないでください。
故障の原因や製品を変形、変色させる可能性があります。
お手入れ方法 (P14 参照) を必ず守ってください。 |
|  | 充電する際は電源を OFF にした状態で、充電口に汚れや異物がないか確認してから行ってください。
故障の原因となります。 |
|  | 使用後は必ず電源を切ってください。(自動オフタイマー約 20 分) |
|  | 放電防止のため定期的に充電してください。
長時間ご使用にならないと機能が低下し、本体内の充電電池の故障の原因になります。 |

セット内容及び各部の名称

● 本体

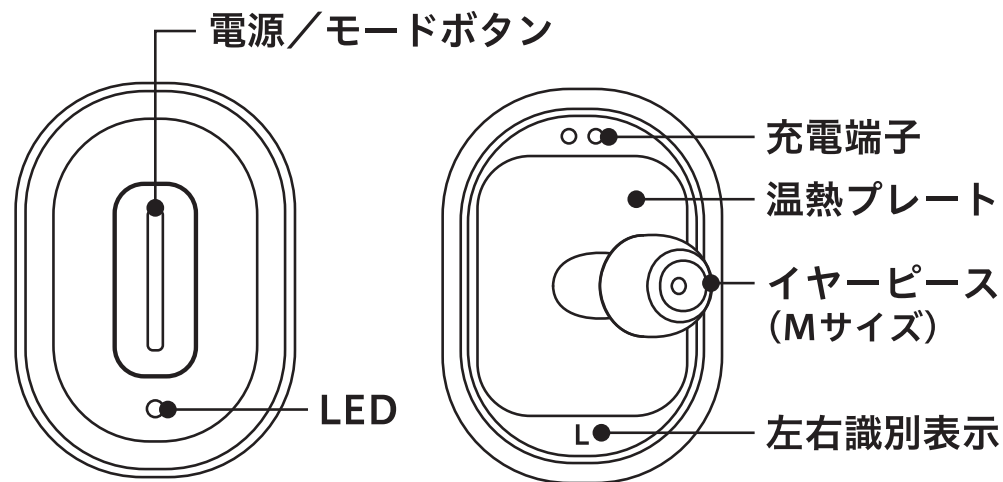


● 充電台

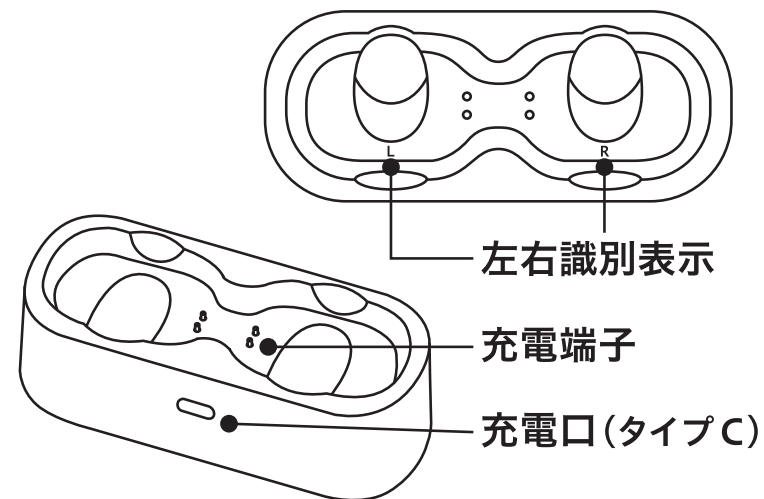


● イヤープース (S/L サイズ)


※工場出荷時はMサイズが本体にセットされています。
(交換の仕方は P11 参照)

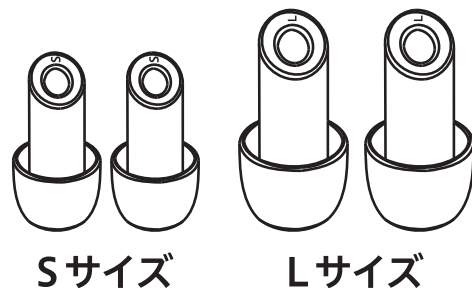

● 取扱説明書

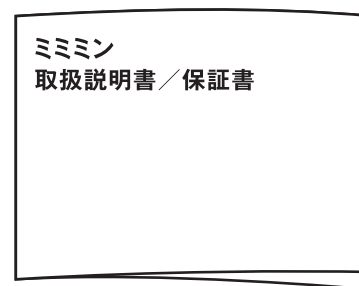

● 充電用USBケーブル

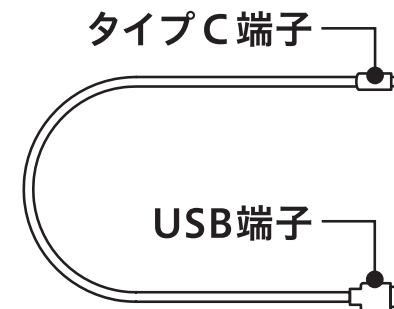


お使いになる前に

● 充電する

充電前に本体、充電台、充電用USBケーブル、ACアダプターに異常がないか、必ず確認してください。

※本体や充電台の充電端子に金属など導電性のものが付着していないか、必ず確認してください。

※充電する際は電源をOFFにした状態で行ってください。

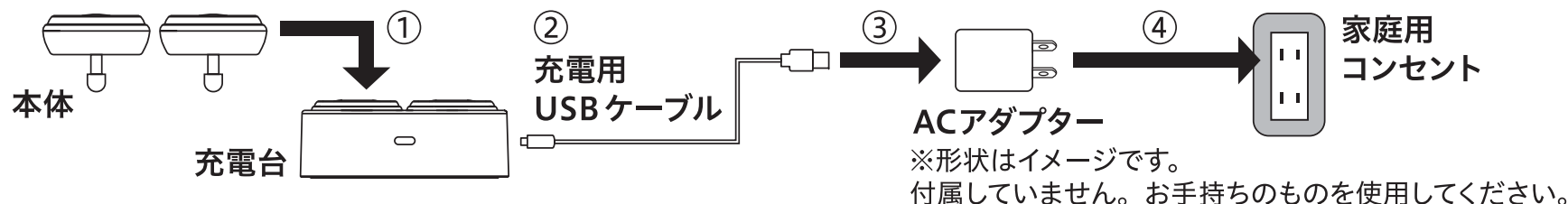

- ① 本体を充電台にセットしてください。充電端子が合うように向きを確認してください。
- ② 充電台の充電口に、充電用USBケーブルのタイプC端子を奥まで確実に差し込んでください。
- ③ 充電用USBケーブルのUSB端子をACアダプターのUSB端子口に奥まで確実に差し込んでください。
- ④ ACアダプターの電源プラグを家庭用コンセントに差し込んでください。
充電が開始され、LEDが充電状況に応じて点滅／消灯します。

※ACアダプターは定格出力 DC5V 1.0A のものを使用してください。

※充電端子や充電口に汚れや異物がないか確認してから充電を行ってください。


※電池残量がない状態から約1時間30分で満充電となり、約1時間40分の使用が可能です。(使用環境温度により異なります。)

※約10秒経過しても充電が開始されない場合は、差し込みのゆるみがないか確認してください。

※充電をしながらの使用及び本体操作はできません。

※充電完了後は充電用USBケーブルを抜いてください。

※長期間使用しなかった時は充電に時間を要する場合があります。

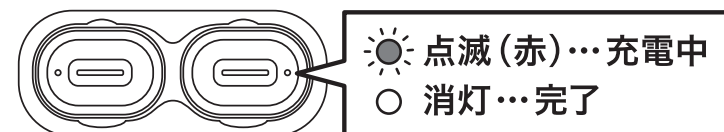


● イヤーピースの交換方法


付属のイヤーピース (S/L サイズ) と交換することができます。
最適なイヤーピースを選択しセットしてください。

※工場出荷時はMサイズが本体にセットされています。

※ゆるいと感じる時はサイズを上げてください。きついと感じる時はサイズを下げてください。

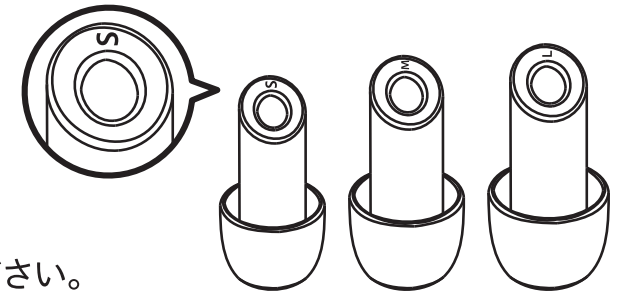


取り外し方

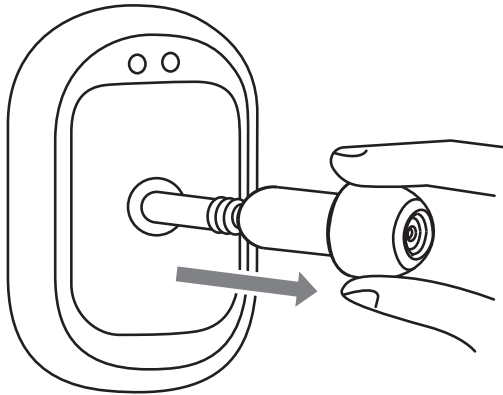


イヤーピースを指でつまみ、
引っ張って取り外します。

取り付け方

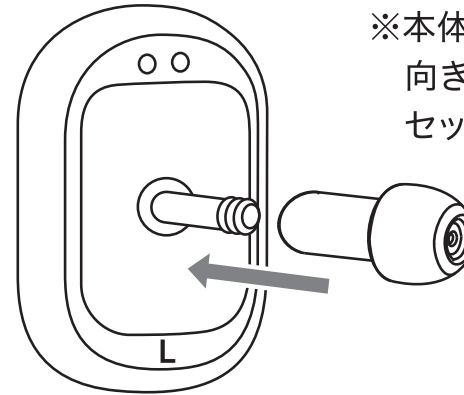

※本体との隙間ができないように、
向きを合わせて確実に
セットしてください。

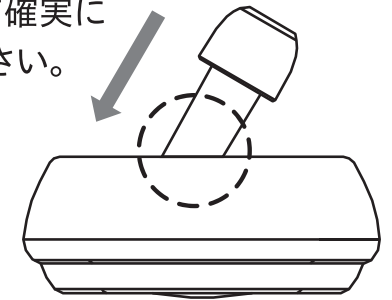

イヤーピースの穴と本体の軸を合わせ、
奥までしっかり差し込んで取り付けます。

⚠ 警告


イヤーピースが確実に取り付けられていないと、耳に入らなかったり、使用中に外れて耳の中に残る場合があります。
使用前には必ず、確実に取り付けられていることを確認してください。

使い方

● 操作方法

- ① 電源／モードボタンを長押しして、電源をONにしてください。

電源を入れると、LEDランプが点灯(約5秒間)し、「弱」で動作を開始します。

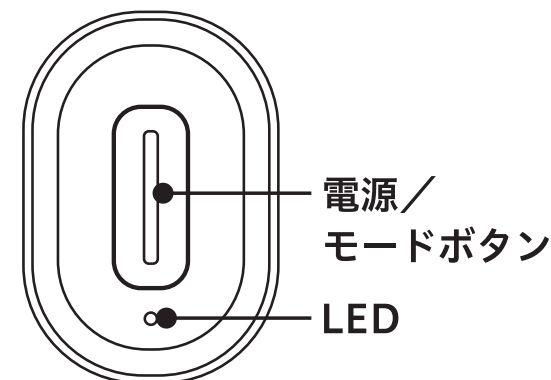

- ② 電源／モードボタンを押し、お好みのモードを選んでください。


弱モード (緑 LED) … 約 37℃

中モード (橙 LED) … 約 39℃

強モード (赤 LED) … 約 41℃

※記載の温度は目安です。

※LEDは約5秒間点灯後、消灯します。


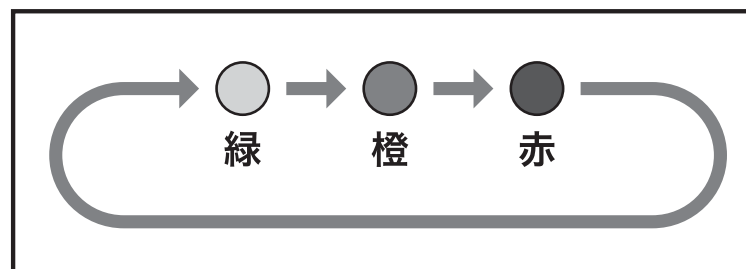


- ・電源／モードボタンを押す毎に、モードが「弱→中→強→弱…」の順に変わります。
- ・動作開始後約20分で、自動的に電源がOFFになります。
- ・電池残量が少ない時は、LEDランプが点滅します。(約5秒)

- ③ 途中で使用をやめる際は、電源／モードボタンを長押ししてください。

● 装着方法

本体の左右を確認し、それぞれの耳に装着してください。

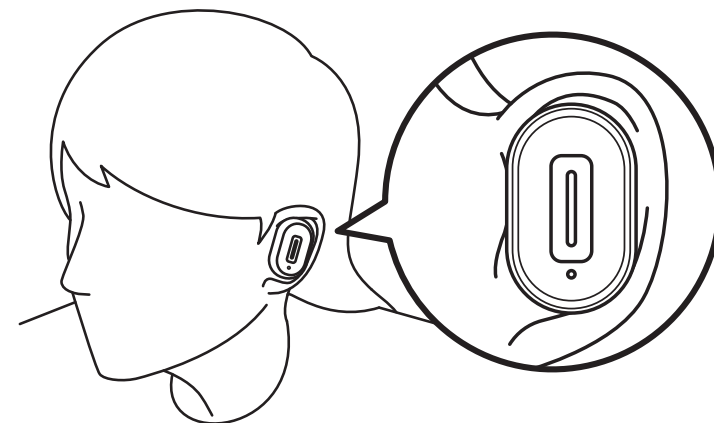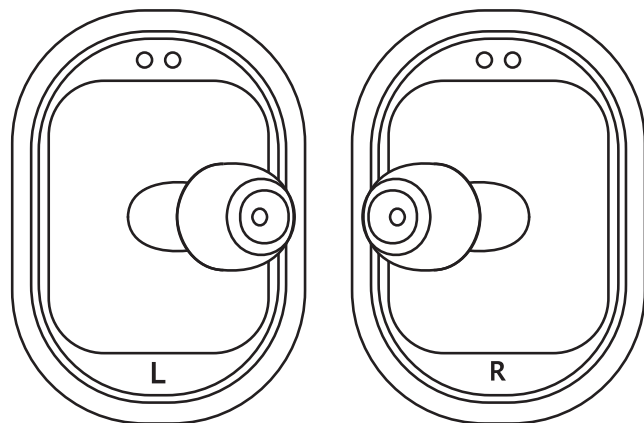

- ・「L」の表記がある方を左耳、
「R」の表記がある方を右耳に付けてください。

- ・ イヤーピースが耳の穴に合うように、
角度を調節してください。
- ・ 遮音できていること、
あたたかさを感じられることを確認してください。

警告

イヤークリップを取り外した状態で使用しないでください。
またイヤークリップが破損した状態で使用しないでください。事故やケガの原因となります。

お手入れ方法

使用後は本体を清潔に保つため、毎回お手入れをしてください。

- ①電源がOFFになっていることを確認してください。
- ②タオルなどの乾いた柔らかい布で、本体についている汚れを拭き取ってください。
汚れがひどい時は、水または中性洗剤を染み込ませた布をよく絞って拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- ③直射日光を避け、風通しの良い場所で乾燥させてください。

※水気や液体が内部に入らないようにしてください。

※アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

保管及び廃棄

- 汚れやホコリを取ったあと、高温多湿な場所、ホコリの多い場所は避けて、直射日光の当たらないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、袋に入れる、または布やカバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 充電用USBケーブルは本体から抜き、ねじれをほどいて保管してください。
- 乳幼児やペットが触れない場所に保管してください。
- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。
一般ごみ（不燃ごみ）と一緒に廃棄せず、お住まいの市区町村の条例に従ってください。



Li-ion

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。分解したり、修理、改造は絶対にしないでください。異常動作をして事故やケガの恐れがあります。

動作しない	電源が入っていない。	電源／モードボタンを長押ししてください。
	電池残量がない。	充電してください。(P10 参照)
急に止まった	自動 OFF タイマーが作動した。	故障ではありません。 再度電源ボタンを長押しすると動作します。
	電池残量がなくなった。	充電してください。(P10 参照)
充電が開始されない	AC アダプター、充電用 USB ケーブルが正しく差し込まれていない。	AC アダプター (定格出力 DC5V 1.0A)、充電用 USB ケーブルの接続を確認の上、LED の表示を確認してください。(P10 参照)

充電が 開始されない	充電台に正しく セットされていない。	本体と充電台の左右を確認し、 充電端子が合うようにセットしてください。
充電台から 本体が 取り出せない	商品仕様によるもの。 (マグネット固定)	充電を正常に行うため、 充電台にマグネットが埋め込まれています。 本体と充電台の間に指をかけて持ち上げてください。
温度が高い (熱く感じる)	温度の 設定レベルが高い。	電源／モードボタンを押して、温度のレベルを下げてください。 例)「中」で強く感じる場合は、「弱」をお試しください。
温度が低い (温かく感じない)	温度の 設定レベルが低い。	電源／モードボタンを押して、温度のレベルを上げてください。 例)「中」で弱く感じる場合は、「強」をお試しください。
遮音されない (遮音が弱い)	正しく 装着できていない。	本体の左右や、装着の向きが正しいか確認してください。 (P13 参照)
	イヤーピースが 合っていない。	最適なイヤーピース (S/M/L) を選択し、 正しくセットしてください。(P11 参照)

仕様

品名	ミミミン
品番	C-RW001PP
電源	DC5V 1.0A
電力	リチウムイオン電池
充電時間 使用時間	充電時間 約1時間30分 使用時間 約1時間40分 ※使用環境温度により異なります。
タイマー	約20分

製品サイズ	本体 約44×30×32mm 充電台 約102×41×33mm
製品重量	本体 約14g×2 充電台 約40g 総重量 約68g
材質	ABS、シリコーン
生産国	中国
製造販売元	株式会社クレオテクノロジー

保証とアフターサービス 必ずお読みください。

(1) 保証書

保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

(2) 保証期間中に修理を依頼される場合

保証書の記載内容に従って修理いたします。

(3) 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理いたします。

(4) 補修用部品の最低保有期間

当社はこの「ミミミン」の補修用性能部品※を製造打ち切り後最低2年間保有しております。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する為に必要な部品です。

(5) ご使用中に普段と異なる状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。

※お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対にやめてください。

お客様相談窓口



0120-540-743 受付時間 土日、祝日を除く 平日 10:00～17:00



株式会社クレオテクノロジー 〒939-3524 富山県富山市水橋伊勢屋 158-1